

SETApure – Professionelle Flächendesinfektion

Eigenschaften

SETApure ist ein gebrauchsfertiger Oberflächenreiniger auf Alkoholbasis. SETApure desinfiziert schnell und zuverlässig alle abwaschbaren und alkoholbeständigen Oberflächen und Gegenstände. Hinterlässt keine Rückstände. Trocknet schnell.

Beseitigt 99,9 % der Bakterien und speziellen Viren (z. B. Influenzaviren, Coronaviren).

BAUA Reg.Nr. N-97608. Bakterizid nach DIN EN 13727 in 60s, levurozid nach DIN EN 13624 in 60s, begrenzt viruzid nach DIN EN 14476 in 60s.

Inhaltsstoffe:

SETApure enthält folgende biozide Wirkstoffe:

Ethanol (CAS 64-17-5) 63,0 g / 100 g (70,21 ml / 100 ml)

Gebrauchsanweisung

Geeignet für alle Arten von alkoholbeständigen Oberflächen.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Bei Anwendung im Lebensmittelbereich Oberflächen anschließend mit klarem Wasser abspülen. Bei empfindlichen Materialien (Textilien, Leder, lackierte Flächen)

Desinfektionsmittel auf Tuch aufsprühen und abwischen. Vorab an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

Mindestens 60 Sekunden einwirken lassen. Nicht großflächig anwenden.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Gebinden und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Gefahrenhinweise (de)

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:





Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Explosionsgeschützte (elektrische / Lüftungs- / Beleuchtungs-) Geräte verwenden.

Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz / Gehörschutz tragen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen (oder duschen).

BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Kühl lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

SETASAN care GmbH

Hermann-Beuttenmüller-Str. 14 | 75015 Bretten

+49 7252 5861430 | +49 1525 7895210

a.steinbeck@setasan.de | www.setasan.de